




CarePartner 

Company details

Top Partners A/S	Year	2000
CarePartner ApS	Year	2012
Buller Invest ApS	Year	2008
Top Buildings	Year	2005

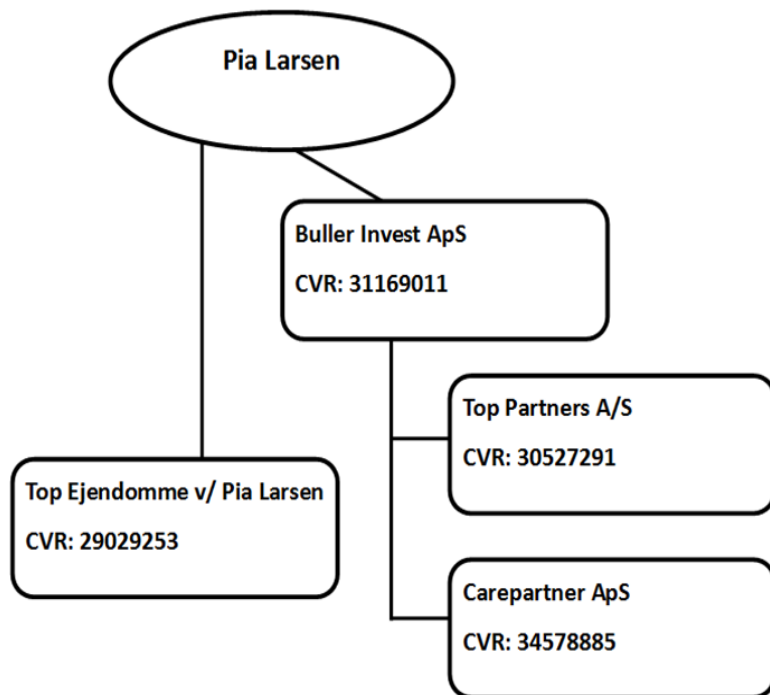

Mit navn og baggrund:

Preben Buch Christensen
Salgschef

Har i flere år arbejdet med mobilisering af kritisksyge patienter
bl.a. på hospitalernes intensivafdelinger og fys. og ergo afsnit.

Velkommen til præsentation af



neuroforma

innovative rehabilitation support



Company presentation



Management
System
ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 000073249

CarePartner

Et par eksempler fra deres program:





neuroforma

innovative rehabilitation support


Neuroforma i praksis



Træningen centralt i
ex. Behandlingscentret.
Anvender stationær-løsning
eller Pc'er.




Borgere i eget hjem,
der kan få hjælp fra terapeut
eller pårørende anvender PC'er

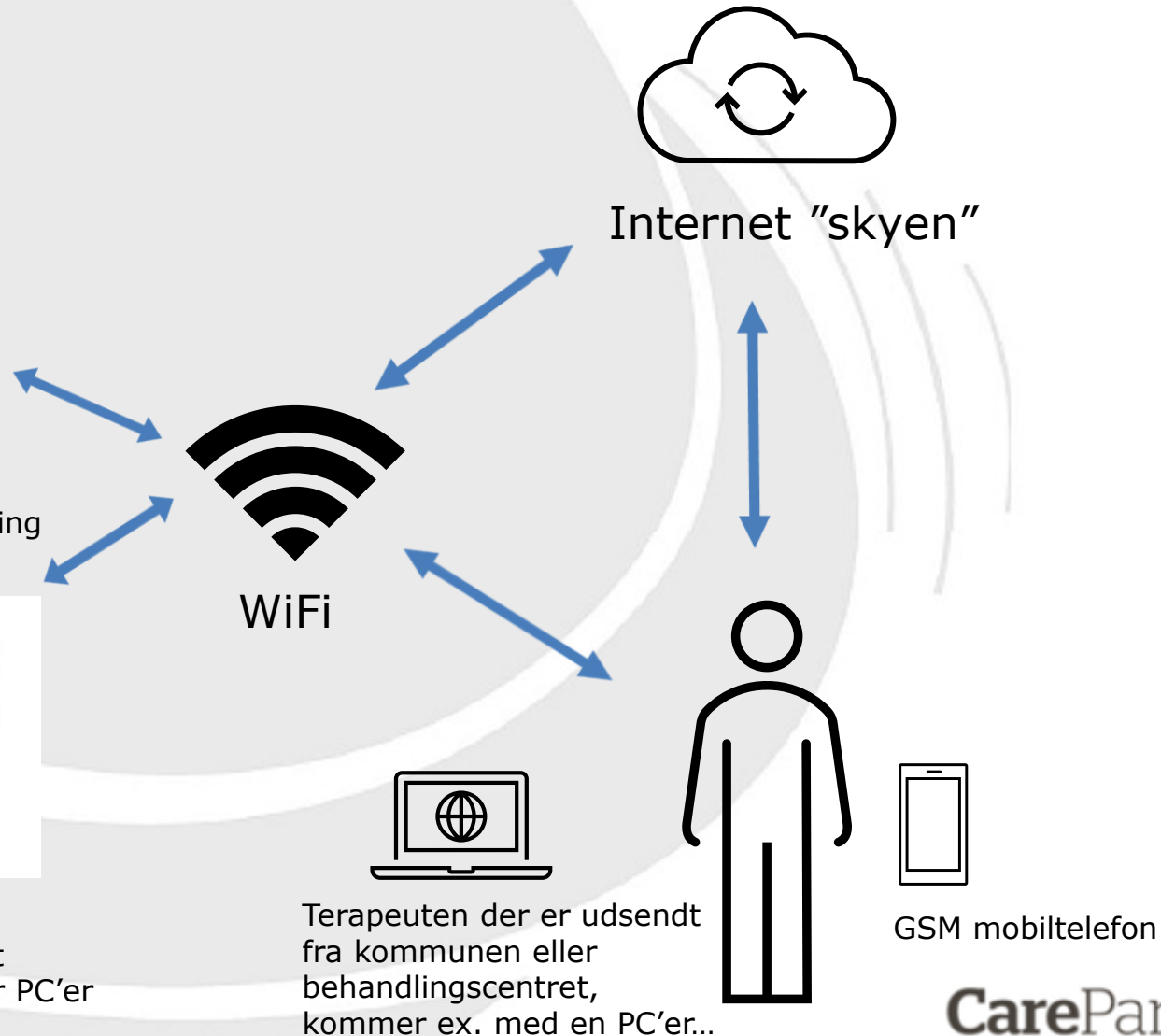

Stationært eller mobilt? Telebehandling eller telegenoptræning?

Neuroforma, en nyskabelse på en nutidig platform i to varianter:

- Stationær løsning med **anvanceret** kamera
- Mobil løsning med **anvanceret** kamera
- Mobilløsning med PCer (Windows) med indbygget kamera

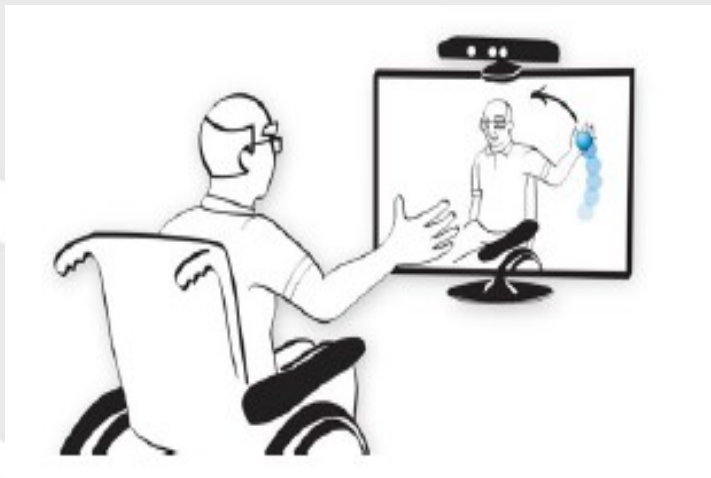

De to forskellige Neuroforma-løsninger:

Behovet afgør valget, men hvad er mulighederne, og hvad er forskellene?

Overordnet set er der to forskellige løsninger:

- A. Med avanceret kamera der giver mulighed for balance og spejløvelser til bl.a. stående træninger
- B. Standardkamera der giver mulighed for at anvende standard PC'er på Windowsplatform og inkl. kamera.

Hvad har de to løsninger tilfælles?

- Man skal anvende WiFi (LAN) eller eks. GSM 3-5K signal (WAN), f.eks. via mobiltelefon
- Browserbaseret løsning
- Monitorering af data til dokumentation og statistik
- Ubegrænset dynamisk udvidelse af antal brugere
- Ubegrænset databank (cloud)*)
- Løbende gratis softwareopdatering
- Løbende tilførsel af antal øvelser
- Windows

*) Overholder GDPR krav til sikkerhed

Og nu den praktiske del af Neuroforma....
Enkel og nem brugerflade, man ikke kan ødelægge...☺

Alle

Telerehabilitering

Søg efter patient

Indtast patientens for- eller efternavn

Tilføj patient

Patientens navn	Hjemmetræning	Handlinger
 Preben Buch Christensen	Neuroforma Aktiv et år	  
 Hans Jørgen Petersen	Neuroforma Aktiv et år	  
 Pia Larsen	invitation Inviteret 9 måneder siden	  
 Jacob Jensen	Neuroforma Aktiv 9 måneder	  
 Anja Smaakjær	Neuroforma Aktiv 9 måneder	  
 Jonny Brauer	invitation Inviteret 8 måneder siden	  
 Lene Hansen	invitation Inviteret 3 måneder siden	  
 Hanne Christensen	invitation Inviteret 2 måneder siden	  
 Ole Olsen	invitation Inviteret 2 måneder siden	  
 Mette1	Neuroforma Aktiv 2 måneder	  
 Mette2	Neuroforma Aktiv 2 måneder	  
 Helle Petersen	invitation Inviteret 2 måneder siden	  
 Test patient	Neuroforma Tele Aktiv 2 dage	    

Generel information



Preben Buch
Christensen

[Rediger profil](#)

E-mail ole.olsen@carepartner.dk

telefon 20209478

Aktivitetsoversigt



Registreret i NF for
320 dage

Konto oprettet: 07.10.2020



Sidste øvelser
en måned siden

Sidste øvelse: 13.07.2021



Antal øvelser i den
sidste uge

0 øvelser



Antal øvelser i den
sidste måned

0 øvelser



Træningsvarighed i den
sidste måned

0 h. 1 m.



Træningsvarighed i den
sidste måned

0 h. 1 m.

Patient informationer forsætter på næste side

Bemærkninger

Tilføj note



Preben Buch Christensen Tilføjet: 2021-06-29 | 09:39
Kære Marianne Husk nu at træne min 20 min med Preben

Redigere



Preben Buch Christensen Tilføjet: 2021-06-17 | 11:29
hej Peter, husk nu træningen selvom det er varmt

Redigere



Preben Buch Christensen Tilføjet: 2021-05-28 | 11:28
Husk 3 x 3 min. interval

Redigere



Preben Buch Christensen Tilføjet: 2021-05-25 | 09:59
Kære Vivi Husk din daglige træning

Redigere

At vise 10 ▼ noter

< 1 >

Del hjemmeøvelser

Neuroforma
gratis hjemmetræningsforsøg ?

fra: 07/10/2020 14:08

Neuroforma Tele
telerehabiliteringstjeneste ?

fra: 07/10/2020
til: 13/07/2021 (udløbet en måned siden)

Kør det

Historik om hjemmetræningslicenser

Navn	aktiv siden	aktiv indtil
Neuroforma Tele	13/07/2021	13/07/2021
Neuroforma Tele	26/05/2021	09/06/2021
Neuroforma Tele	24/03/2021	07/04/2021
Neuroforma Tele	27/01/2021	24/02/2021

Træningssessioner

Opret ny session



Telerehabilitering

Session 25. maj 2021 10:08

Anslået sessionsvarighed: 15 minutter

Indeholder 5 øvelser



Start

Øvelser

Tilføj brugerdefinerede øvelse

Alle

Favorit

Søgeøvelser

- ☒ Alle ☐ Brugerdefinerede ☐ Følge ☐ Tæller ☐ Håndtag ☐ Hukommelse ☐ Håndmuskler ☐ Opmærksomhed
- ☐ Åndedrætsvaner ☐ Visuel Analyse ☐ Bevægelsesområde ☐ Posturale Muskler ☐ Reaktionshastighed
- ☐ Modsatrettede Bevægelser ☐ Begge Hænder Koordinering ☐ Koordination Mellem Øje Og Hånd




Sommerfugl

- håndmuskler ■ opmærksomhed
- følge

Fokuser på sommerfuglen, der flyver rundt på skærmen, og hold din hånd på den. Lad dig ikke lokke af andre genstande, der prøver at distrahere dig.

Info

Start

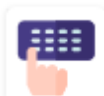

Maskine

- håndmuskler
- begge hænder koordinering

Reager hurtigst muligt på de hvide lys, der tændes på maskinen. Vær opmærksom og reager ikke, når et rødt lys tændes.

Info

Start



Visker

- håndmuskler ● bevægelsesområde

Fjern pletter, der vises på skærmen. Lav en håndbevægelse, der ligner at tørre en ægte plet af glasset med en svamp.

Info

Start



Fodbold



- posturale muskler
- reaktionshastighed

Lær dig ud for at hoppe bolden og score et mål. Pas på basketballkuglerne, der prøver at narre dig.

Info

Start



Boksning



- håndmuskler
- modsatrettede bevægelser

Slå boksseækkene ved at føre armene gennem midten af din krop. Slå tasken til venstre med din højre hånd og tasken til højre med den venstre hånd.

Info

Start



Cookies



- bevægelsesområde
- visuel analyse
- opmærksomhed

Beslut hvilken halvdel der er den manglende del af cookien, der vises på pladen nederst på skærmen.

Info

Start



Kugler



- bevægelsesområde
- reaktionshastighed
- opmærksomhed

Læs instruktionen, se på det farvede tavle, og bestem hvilken marmor der repræsenterer det rigtige svar.

Info

Start



Kastanjer



- håndmuskler
- bevægelsesområde
- reaktionshastighed

Saml brune kastanjer, der vises blandt bladene. Undgå at banke kastanjer i den spidse skal.

Info

Start



Operationer



- hukommelse
- tæller

Anslå resultaterne af de matematiske operationer, og angiv den laveste eller højeste.

Info

Start



Spillikins



- bevægelsesområde
- visuel analyse
- opmærksomhed

Placer bunken med spildevand, og angiv, hvilken der i øjeblikket er øverst, hvilket betyder, at den ikke er dækket af andet spildevand.

Info

Start



Stier



- håndmuskler
- begge hænder koordinering
- følge

Hold begge hænder på ballonerne, der bevæger sig langs stierne på skærmen. Følg ballonen til venstre med din venstre hånd og ballonen til højre med den højre hånd.

Info

Start



Spore



- håndmuskler
- følge

Hold din hånd på bilen, der bevæger sig langs det udpegede spor. Skift hænder under træningen for at nå bilen i hvert hjørne af sporet.

Info

Start

Øvelser fortsat...



Vinketest

brugerdefinerede

Brug kun højre hånd

Info Start



Kaffekoppen

håndtag brugerdefinerede

æjæioferåpfojeprøk
øaofjoårfjqepok

Info Start



[Boksning] Hjemme øvelse

koordination mellem øje og hånd
begge hænder koordinering

Boksetræning i hjemmet

Info Start

- På nuværende tidspunkt er der 12 øvelser med 28 sværhedsgrader
Sværhedsgraderne tilpasses hver enkel øvelse og efter borgerens behov
- Der kan frit laves egne øvelser som kan sendes/ anvendes af borgeren
- Øvelserne kan optages og lagres (efter gensidig aftale). Disse optagelser/ videoer kan ses efterfølgende og på en graf med dato og tidspunkt
- Data lagres i såvel tal som grafer, som kan sikres i fil format.

Indholdet af en session og niveauer samt funktioner

Indtast sessionsnavnet

Session 25. maj 2021 10:08

Tilføj øvelser

	Dyrke motion	Niveau	Varighed	Bevægelsesområde	Slet
⋮	 Cookies • bevægelsesområde • visuel analyse • opmærksomhed	28 22 ⓘ	2 min.		
⋮	 Kastanjer • håndmuskler • bevægelsesområde • reaktionshastighed	7	3 min.		
⋮	 Sommerfugl • håndmuskler • opmærksomhed • følge	9	2 min.		
⋮	 Maskine • håndmuskler • begge hænder koordinering	8 7 ⓘ	5 min.		
⋮	 Operationer • hukommelse • tæller	1	3 min.		

Anslået sessionsvarighed 15 min.

Annuller

Gem og start

Gem session

Præstationer



Måned: januar 2021

Uge **Måned** År Vælg...

Søg



Boksning



Cookies



Kugler



Kastanjer



Operationer



Spillikins



Stier




Spore



Fodbold

Præstationer i øvelsen: Boksning

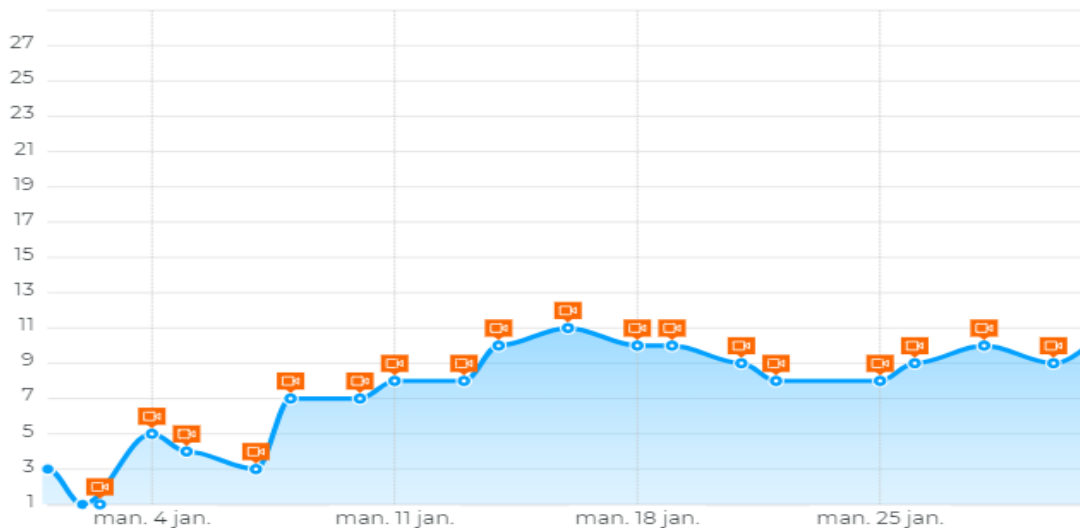

Liste over løb til træning Boksning fra perioden januar 2021

	Dato	Dyrke motion	Tilgængelige data	Varighed
>	01/01/2021 00:04	Boksning		03:14
>	02/01/2021 13:28	Boksning		03:18
>	02/01/2021 13:46	Boksning		02:04
>	04/01/2021 01:48	Boksning		03:06
>	04/01/2021 02:06	Boksning		02:09

Beskeder



Ny meddelelse

Tekst

Ny meddelelse

Stemme

Ny meddelelse

Video

Preben Buch Christensen


30. mar 2021 13:28

Når det er korrekt indstillet til træning, skal du forblive på plads.



Preben Buch Christensen 30. mar 2021 13:28

Se videobeskeden

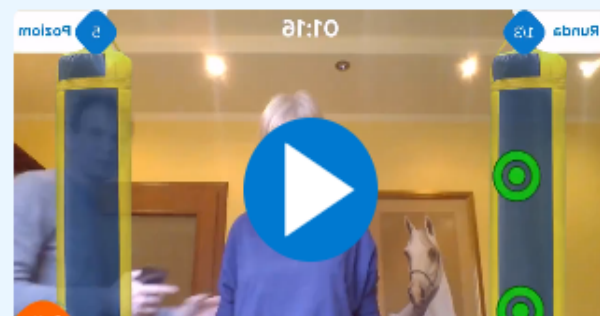



Besked





Et indblik i øvelserne, der nemt giver et
smil og en god stemning

Af de 12 fast øvelser vælges efter behov.
Tryk på INFO:

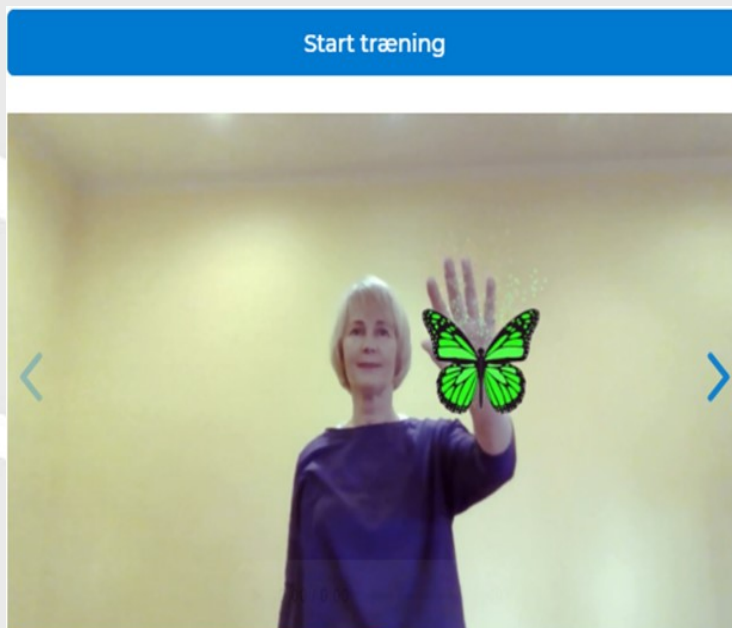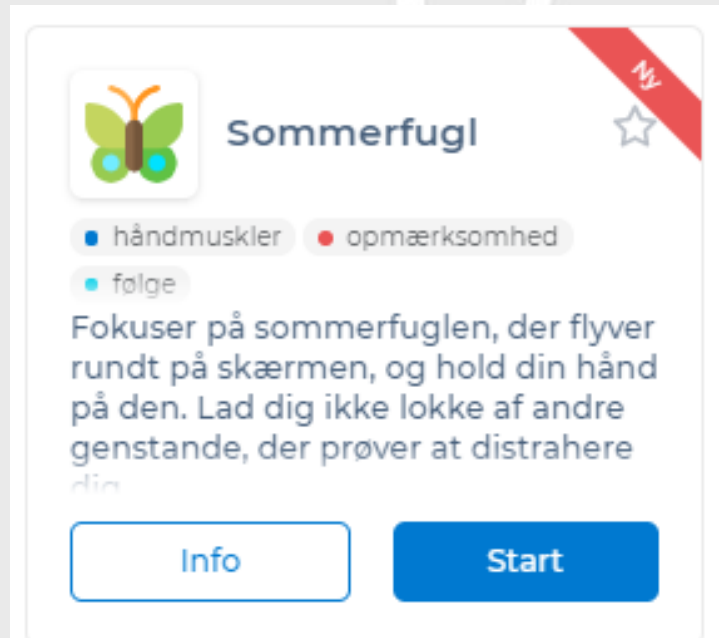

Hvis programmet Sommerfuglen vælges, tryk på start....



Cookies



- bevægelsesområde
- visuel analyse
- opmærksomhed

Beslut hvilken halvdel der er den manglende del af cookien, der vises på pladen nederst på skærmen.

Info



Start

00:59

0
SCORE

55
MÅL



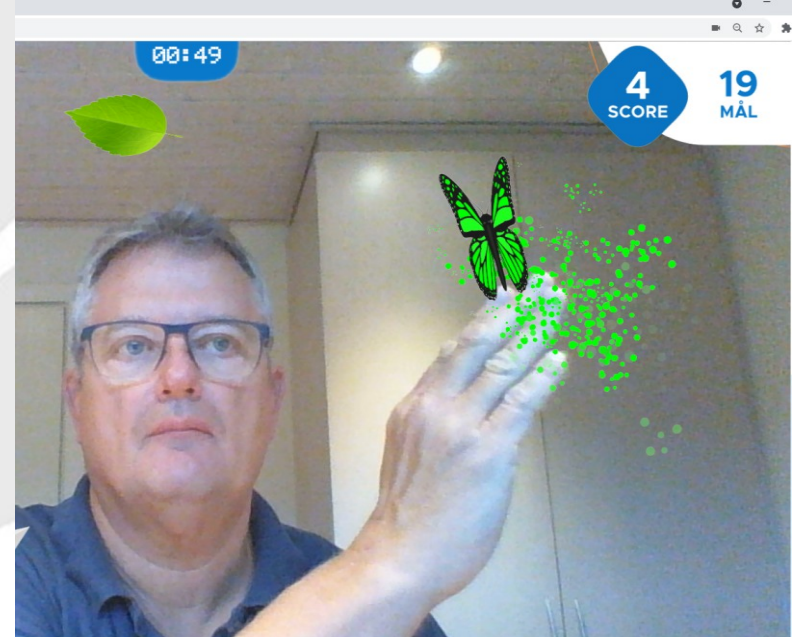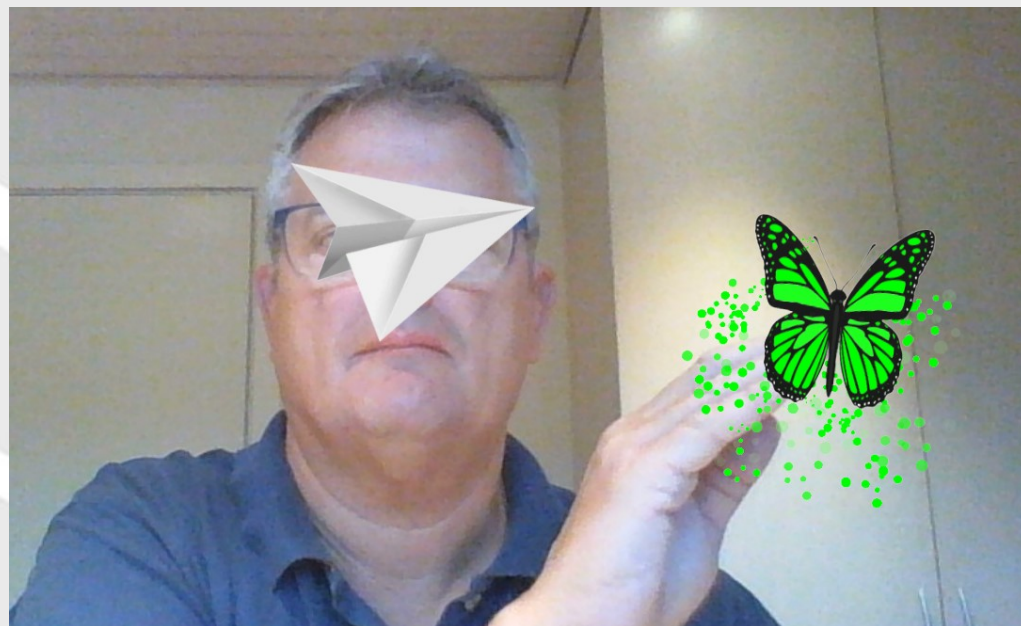



Maskine



- håndmuskler
- begge hænder koordinering

Reager hurtigst muligt på de hvide lys, der tændes på maskinen. Vær opmærksom og reager ikke, når et rødt lys tændes.

Info

Start

00:56

0
SCORE

17
MÅL





Operationer



• hukommelse • tæller

Anslå resultaterne af de matematiske operationer, og angiv den laveste eller højeste.

Info

Start

00:51

0
SCORE

12
MÅL

3+1

DEN LAVESTE

5+5

Opsummering:

- Let tilgængeligt og sikkert system
- Flexibelt system, nutidigt...
- Enkel brugerflade
- Ingen startomkostninger og licenser
(ingen opsigelser, udløber automatisk)
- Lave priser og individuelt tilpasset
- Anvende egne PC'ere
- Gratis hjælp til implementering og undervisning

Gratis prøveperiode på 14 dage

Alle med interesse for afprøvning af Neuroforma, har mulighed for 14 dages prøveperiode, skriv til:

Preben@carepartner.dk

Tlf.2020 9478

Oplys:

Navn, tlf. nr., institution og e-mail😊



Tak for Deres opmærksomhed😊